

Español

MANUAL DEL PROPIETARIO

Destilador de agua
Bio Aqua



PRESENTACIÓN DEL MANUAL

INSTRUCCIONES DE USO

Nombre Técnico: Destilador de Agua

Nombre Comercial: Destilador de Agua Bio Aqua

Modelo: Bio Aqua

Marca: Saevo

Fabricante / Representante:

Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica

C.N.P.J. 55.979.736/0001-45 - Insc. Est. 582.002.897.114

Rod. Abrão Assed, Km 53+450m - Cx. Postal 782 CEP 14097-500

Ribeirão Preto - S.P. - Brasil

Telefone +55 (16) 3512-1212

Responsable Técnico: Daniel R. de Camargo

CREA-SP: 5062199650

AVISO IMPORTANTE

Para maior segurança:

Lea y entienda todas las instrucciones contenidas en estas instrucciones de uso antes de instalar u operar este equipo.

Estas instrucciones de uso deben ser leídas por todos los operadores de este equipo.

INDICE

02 PRESENTACIÓN DEL MANUAL

04 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

06 MÓDULOS, ACCESORIOS, OPCIONALES Y MATERIALES DE CONSUMO

07 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

07 Características generales

09 Símbolos del embalaje

09 Símbolos del producto

10 OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

12 PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS

13 Condiciones de transporte, almacenaje y operación

13 Sensibilidad a condiciones ambientales previsibles en situaciones normales de uso

13 Precauciones y advertencias “durante la instalación” del equipo

14 Recomendaciones para conservación del equipo

14 Precauciones y advertencias “durante la utilización” del equipo

14 Precauciones y advertencias “después de la utilización” del equipo

15 Precauciones y advertencias durante la “limpieza y desinfección” del equipo

15 Precauciones en caso de alteración en el funcionamiento del equipo

15 Precauciones que deben ser adoptadas contra riesgos previsibles o no comunes, relacionados con la desactivación y abandono del equipo

15 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVA Y PREVENTIVA

15 Procedimientos adicionales para reutilización

15 Limpieza

16 Desinfección

16 Mantenimiento Preventiva

16 Mantenimiento Correctivo

17 IMPREVISTOS - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

18 GARANTÍA DEL EQUIPO

18 CONSIDERACIONES FINALES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Estimado Cliente

Felicitaciones por su excelente elección. Adquiriendo equipamientos con la calidad “Saevo” tiene usted la seguridad de poseer productos de tecnología compatible con los mejores del mundo en su clase.

Este Manual ofrece una presentación general de su equipamiento. Describe detalles importantes que podrán orientarlo en su correcta utilización, así como, en la solución de pequeños problemas eventuales.

Le aconsejamos que lo lea integralmente y lo guarde para futuras consultas.

IDENTIFICACIÓN

Nombre Técnico: Destilador de agua

Nombre Comercial: Destilador de agua Bio Aqua

Modelo: Bio Aqua

Marca: Saevo



IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Indicación del equipamiento

El Destilador de agua Bio Aqua es indicado para utilización en autoclaves, laboratorios, farmacias de manipulación y todos los procedimientos que exigen utilización de agua destilada.

Debiendo ser utilizado y manoseado por persona capacitada (profesional debidamente reglamentado, conforme legislación local del país) observando las instrucciones contenidas en este manual.

Es obligación del usuario usar solamente el equipamiento en perfectas condiciones y proteger a sí mismo, pacientes y terceros contra eventuales peligros.



FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO:

- Cuando el agua destilada se destina para el consumo humano, se debe comprar el filtro de carbón activado, dejando el agua con un sabor mucho más fresca (item opcional disponible para la venta).

Principios y fundamentos aplicados para el funcionamiento del producto

Como en el propio ciclo del agua en la naturaleza, el ciclo empieza cuando los rayos solares calientan los ríos y mares formando vapores de agua que suben para el aire (evaporación), cuando el vapor se enfría se forman las nubes (condensación), que al tornarse pesadas acaban eliminando el agua de vuelta a través de las lluvias (precipitación).

En el Destilador de agua Bio Aqua, el agua se hierve en la cámara de ebullición y cuando alcanza la temperatura de 100°C, bacterias, virus y otros organismos que puedan estar presentes mueren. El agua hirviendo se transforma en vapor, eliminando sólidos disueltos, toxinas químicas, metales pesados y otros contaminantes. El vapor sube por la serpentina de condensación, y enfriando se condensa en gotas de agua purísima. Después de este proceso, el agua todavía pasa por un filtro de carbón activado (opcional), eliminando olores y sabores. El agua pura se recoge en una botella plástica que acompaña al producto.

Descripción del Equipamiento

El Destilador de agua portátil Bio Aqua elimina totalmente los totales sólidos disueltos (minerales, metales pesados, toxinas, o cualquier otro contaminante).

- Posee alta capacidad "4 Litros": volumen suficiente para las más diversas utilidades;
- Purifica el agua en hasta 99,9%, atendiendo a todos los estándares exigidos;
- Es portátil y de fácil instalación;
- Resistente y fácil de limpiar: cuerpo cilíndrico enteramente recubierto por termoplástico;
- Cuba interna construida en acero inoxidable, mayor durabilidad y facilidad de limpieza;
- Abastecimiento manual, no exige instalaciones hidráulicas;
- Posee desconexión automático al final de cada ciclo de destilación.

MÓDULOS, ACCESORIOS, OPCIONALES Y MATERIALES DE CONSUMO



El contenido de esta página es de carácter informativo, pudiendo el equipamiento presentarse diferente del ilustrado. Por lo tanto, al adquirir el producto verifique la compatibilidad técnica entre el equipamiento, acoplamiento y accesorios.



El dibujo ilustra el equipamiento con todos los ítems opcionales, su equipamiento será compuesto solamente de los ítems escogidos durante su opción de compra.



El uso de cualquier parte, accesorio o material no especificado o previsto en estas instrucciones de uso es de entera responsabilidad del usuario.



- 01 - Tapa de condensación
- 02 - Boquilla guía agua tapa de condensación
- 03 - Boquilla guía agua del depósito
- 04 - Reservorio para colecta de agua destilada
- 05 - Tapa del reservorio para colecta de agua destilada
- 06 - Cable entrada de corriente
- 07 - Enchufe de alimentación de la tapa de condensación
- 08 - Cable entrada de corriente
- 09 - Cuba interna en acero inoxidable
- 10 - Botón de accionamiento
- 11 - Led indicativo (botón de accionamiento)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características técnicas

General

Modelo

Destilador de agua Bio Aqua

Modo de Operación

No continua ("ON") 40 a 200min. ("OFF") 30min.

Alimentación

Tensión de Alimentación

127V~: 100V~ - 140V~ / 220V~:198V~ - 242V~

Frecuencia

50/60 Hz

Número de fases

Monofásico / Bifásico

Potencia

127V~(800W) / 220V~(750W)

Otras especificaciones

Volumen destilado

1,2L/h

Capacidad de la cámara de evaporación

4L

Capacidad do reservorio (galón plástico)

3,5L

Material interno de la cámara de evaporación

Acero inoxidable

Carcasa externa

Material termoplástico

Eficiência del calor

>95%

Filtro (opcional)

Carbón activado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones del producto

380 x 235 mm

Dimensiones del embalaje

450 x 260 x 290 mm

Peso neto

3,5 kg

Peso bruto

4,7 kg



Atención al utilizar este equipamiento en conjunto con otros equipamientos que puedan moverse, para que se eviten colisiones.



Los materiales utilizados en la construcción del equipamiento son Biocompatibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Simbolos del embalaje



Apilamiento máximo, determina la cantidad máxima de caja que puede ser apilada durante el transporte y almacenamiento "conforme embalaje".



Embalaje debe ser almacenado y / o transportado evitando la humedad, lluvia y salpicaduras de agua.



Embalaje debe ser almacenado y / o transportado con las flechas para cima.



Embalaje debe ser almacenado o transportado protegido de luz solar.



Embalaje debe ser almacenado y / o transportado con cuidado (no debe sufrir caída y ni impactar).



Determina los límites de temperatura entre los cuales el embalaje debe ser almacenado o transportado.

Simbolos del producto



Botón de accionamiento



Advertencia general:
Si las instrucciones no fueran seguidas debidamente, la utilización puede acarrear daños para el producto, el usuario o el paciente.



Cuidado: Indica aviso importante para hacer la operación del producto. La falta de observación puede ocasionar un mal funcionamiento peligroso.



Nota:
Indica información útil para la operación del producto.



Referirse al manual de instrucciones.



Conexión a tierra (en varios puntos de lo equipo) indica la condición de estar puesto a tierra.

OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

Uso general

El Destilador consiste en dos partes principales: la tapa de condensación y la cámara de evaporación. La tapa contiene la serpentina de condensación, el mini ventilador y el filtro de carbón activado. La cámara de evaporación es fabricada en acero inoxidable, con un sistema eléctrico de calentamiento en la parte inferior.

A - Remueva la tapa de condensación, enjuague la cámara de inox, después complete la cámara con agua de la canilla hasta la marca máxima que es de aproximadamente 4 litros (no adicionar agua arriba de esta marca);



Si el abastecimiento de la cuba fuera hecho hasta el nivel máximo indicado en la lateral de la cuba "4L", el galón por tener su capacidad máxima de "3,5 L" desbordará antes de finalizar toda la destilación.

B - Encaje la tapa de condensación y conecte el cable de la tapa en el enchufe localizado en la base del aparato;

C - Coloque la botella plástica directamente abajo del pico guía de agua;

D - Conecte el cable de energía directamente en un enchufe de corriente eléctrica apropiada;



OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO



E - El destilador conectará automáticamente en el primer uso, cuando esto no ocurriera utilice el botón de accionamiento "SPSP".

El tiempo para producir 4 litros de agua destilada es de aproximadamente 4 horas. El destilador apagará automáticamente cuando toda el agua de la cámara fuera evaporada.

Instalación de filtro de carbón activado*

Sólo habrá la necesidad de utilizar el filtro de carbón activado si el agua se destina al consumo humano.



A - Remueva la boquilla guía ubicado en la tapa de condensación ;

B - Prepara el filtro de carbón activado para reemplazar la boquilla guía, coloca 2 a 3 tazas de agua en el filtro antes de cada ciclo de la destilación. Después de humeder el filtro encaja en la tapa de condensación (C1).



- Evita conectar el aparato sin agua en la cámara.

- Después de un ciclo completo de destilación, no abra de inmediato la tapa de condensación. Espere que enfríe por lo menos por 20 minutos.



Al usar el destilador por primera vez, descarte el primer ciclo de agua destilada, para que los componentes internos sean totalmente esterilizados por este primer ciclo.

*Item Opcional

OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

Cantidad de agua adicionada	1L	2L	3L	4L
Tiempo de calentamiento	8-12 min.	15-20 min.	20-25 min.	30-40 min.
Tiempo de finalización	40-60 min.	80-100 min.	130-160 min.	170-200 min.



Sugestión: Utilice agua caliente para disminuir el tiempo del proceso.

PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS



Jamás cubra o bloquee las aberturas de ventilación del equipamiento.



- Antes de cada ciclo de destilación, el filtro de carbón activado deberá humedecerse.
- El filtro deberá ser substituido a cada 3 meses.



Después de un ciclo completo de destilación, no abra de inmediato la tapa de condensación. Espere enfriar por lo menos por 20 minutos.

- Nunca toque en la superficie interna del tanque cuando el equipamiento está en uso. Espere el total enfriamiento, (aproximadamente 30 minutos). El uso indebido podrá resultar en quemaduras.

PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS

Condiciones de transporte, almacenaje y operación

El equipamiento debe transportarse y almacenarse con las siguientes observaciones:

- Con cuidado, para no sufrir caídas ni recibir impactos.
- Con protección de humedad, no exponer a lluvias, respingos de agua o piso húmedo.
- Mantener en local protegido de lluvia y sol directo y en su embalaje original.
- Al transportar, no moverlo en superficies irregulares y proteja el embalaje de la lluvia directa y respete el apilamiento máximo informado en la parte externa del embalaje.

Condiciones ambientales de transporte o almacenamiento:

- Faja de temperatura ambiente de transporte o almacenamiento -29°C a +60°C.
- Faja de humedad relativa de transporte o almacenamiento 20% a 90%.
- Faja de presión atmosférica 500hPa a 1060 hPa (375 mmHg a 795 mmHg).

Condiciones ambientales de acondicionamiento (entre las operaciones):

- Faja de temperatura ambiente de acondicionamiento -10°C a +55°C.
- Faja de temperatura ambiente recomendada +15°C a +30°C.
- Faja de humedad relativa de acondicionamiento 30% a 75%.
- Faja de presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg).

Condiciones ambientales de operación:

- Faja de temperatura ambiente de funcionamiento +10°C a +40°C.
- Faja de temperatura ambiente recomendada +21°C a +26°C.
- Faja de humedad relativa de funcionamiento 30% a 75%.
- Faja de presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg).
- Altitud de operación: ≤2000m.



ATENCIÓN

El Equipamiento mantiene su condición de seguridad y eficacia, siempre que mantenido (almacenado) conforme mencionados en esta instrucción de uso. De esta forma, el equipamiento no perderá o alterará sus características físicas y dimensionales.

Sensibilidad a condiciones ambientales previsible en situaciones normales de uso

El equipamiento fue proyectado para no ser sensible a interferencias como campos magnéticos, influencias eléctricas externas, descargas electrostáticas, a presión o variación de presión, desde que el equipamiento sea instalado, mantenido limpio, conservado, transportado y operado conforme esta instrucción de uso.

Precauciones y advertencias “durante la instalación” del equipamiento

- Verifique el voltaje del equipamiento en el momento de hacer la instalación eléctrica.
- Posicione el equipamiento en un lugar donde no sea mojado.
- Instale el equipamiento en un local donde no será dañado por la presión, temperatura, humedad, luz solar directa, polvo y sales.
- El equipamiento no deberá someterse a inclinación, vibraciones excesivas o choques (incluyendo durante transporte y manipulación).
- Este equipamiento no fue proyectado para uso en ambiente donde vapores, mezclas anestésicas inflamables con el aire, u oxígeno y óxido nitroso puedan ser detectados.
- Antes de la primera utilización y/o después de largas interrupciones de trabajo como vacaciones, limpie y desinfecte el equipamiento.

PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS



Cable a tierra:

El cable a tierra es obligatorio, solamente de esta manera el usuario estará en completa seguridad. Cabe solamente al usuario la responsabilidad por no colocar el cable a tierra implicando la pérdida de la garantía.

Utilizar enchufe de tres pines. Nunca conectar el cable a tierra en el neutro.

Recomendaciones para conservación del equipo

Su equipamiento Saevo fue proyectado y perfeccionado dentro de los padrones de la moderna tecnología. Como todos los aparatos, necesita de cuidados especiales, que muchas veces son olvidados por diversos motivos y circunstancias.

Por eso, aquí están algunos recuerdos importantes para su día a día. Procure observar estas pequeñas reglas que, incorporadas a la rutina de trabajo, irán proporcionar gran economía de tiempo y evitarán gastos desnesarios.

Precauciones y advertencias “durante la utilización” del equipo

El equipamiento deberá ser operado solamente por técnicos debidamente habilitados e entrenados (Cirujanos Dentistas y Profesionales Capacitados).

- Ante la necesidad de un eventual mantenimiento, utilice solamente servicios de la Asistencia Técnica Autorizada Saevo.
- El equipamiento fue fabricado para soportar operación continua e intermitente; por lo tanto siga los ciclos descritos en estas Instrucciones de Uso.
- Aunque este equipamiento haya sido proyectado de acuerdo con las normas de compatibilidad electromagnética, puede, en condiciones muy extremas, causar interferencia con otros equipamientos. No utilice este equipamiento en conjunto con otros dispositivos muy sensibles a la interferencia o con dispositivos que críen altos disturbios electromagnéticos.
- No someter las partes plásticas al contacto con sustancias químicas, utilizadas en las rutinas del tratamiento odontológico. Tales como: ácidos, mercurio, líquidos acrílicos, amalgamas, etc.
- Nunca bloquee las aberturas de ventilación del aparato. Mantenga las aberturas libres de hilachas, pelos y otros materiales.
- No llene el tanque encima de la línea máxima para evitar desbordamiento.
- Nunca toque la superficie interna del tanque cuando el equipamiento está en uso. Guarde el total enfriamiento (aproximadamente 30 minutos). El uso indebido podrá resultar en quemaduras.
- Antes de cada ciclo de destilación, el filtro de carbón activado deberá ser humedecido.

Saevo no se responsabiliza por:

- Uso de equipamiento diferente de aquello que ha sido destinado para su uso.
- Daños causados al equipamiento, al profesional y/o al paciente por la instalación incorrecta y procedimientos errados de mantenimiento, diferentes de aquellos que están descritos en estas instrucciones de uso que acompañan al equipamiento o por su operación incorrecta.

Precauciones y advertencias “después de la utilización” del equipamiento

- Apague la llave general del consultorio cuando no se encuentra en uso por un tiempo prolongado.
- Mantenga el equipamiento siempre limpio para la próxima operación.
- Evite modificar cualquier parte del equipamiento. No desconecte el cable u otras conexiones sin necesidad.

PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS

Precauciones y advertencias durante la “limpieza y desinfección” del equipo

- Antes de limpiar el equipo, apague la llave general.
- Evite derramar agua u otros líquidos dentro del equipo, eso podría causar cortos circuitos.
- Evite utilizar material micro abrasivo o esponja de acero en la limpieza, evite emplear solventes orgánicos o detergentes que contengan solventes, tales como: éter, tira manchas, etc.

Precauciones en caso de alteración en el funcionamiento del equipo

- Si el equipo presenta alguna anomalía, verificar si el problema está relacionado con algún ítem de la lista de tópicos imprevistos (fallas, causas y soluciones). En caso de no ser posible solucionar el problema, apague el equipo, retire el cable de alimentación de energía de la toma de corriente y contactase con tu representante (Saevo).

Precauciones que deben ser adoptadas contra riesgos previsible o no comunes, relacionados con la desactivación y abandono del equipo

Para evitar contaminación ambiental o uso indebido del Equipamiento después de su inutilización, el mismo debe ser descartado en local apropiado (conforme legislación local del país).

- Cumplir la legislación local del país para las condiciones de instalación y descarte de los residuos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Procedimientos adicionales para reutilización

El equipamiento es reutilizable en cantidades indeterminadas, o sea, ilimitadas, necesitando apenas de limpieza y desinfección.

Limpieza

Importante: Para efectuar la limpieza o cualquier tipo de mantenimiento asegúrese que el equipamiento esté desconectado de la red eléctrica.

Limpieza interna Del tanque:

NOTA: El cambio en el aspecto visual del interior del tanque de destiladora es una característica normal del producto debido al calentamiento.

Manchas y puntos de oxidación se pueden producir debido al uso, que puede ser total o parcialmente eliminado de acuerdo con el procedimiento recomendado como sigue:

Para efectuar la limpieza interna del destiladora recomendamos el uso del producto “Steel-Clean”. Producto notificado en ANVISA/MS.

ADVERTENCIA: Realiza la limpieza según lo especificado por el fabricante (vea la etiqueta). Si el procedimiento de la limpieza se realiza erróneamente, puede causar el oscurecimiento de la superficie aplicada.

Composición del producto: Tensoactivo aniónico, ácido inorgánico, secuestrante, conservante, colorante y vehículo.

ADVERTENCIA: Después del procedimiento de limpieza realiza 1 ciclo completo de destilación y después del ciclo, descarta el agua del depósito y seca la cuba con ayuda de un paño limpio.



El registro en el Ministerio de Salud del “Steel-Clean” es realizado separadamente del producto descrito en este manual, porque el “Steel-Clean” no es fabricado por Saevo.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Limpieza externa:



ATENCIÓN

- Con el objetivo de eliminar riesgos de seguridad o daños al equipo, recomendamos que al efectuar la limpieza no penetren líquidos en el interior del mismo.
- Para efectuar la limpieza del equipo utilice un paño húmedo con agua y jabón neutro. La aplicación de otros productos químicos para limpieza a base de solventes o hipoclorito de sodio no son recomendados, ya que pueden dañar el equipo.

Desinfección

- Para realizar la desinfección del equipo utiliza un paño limpio y suave humedecido en alcohol 70%.
- Nunca utilice desinfectantes corrosivos o solventes.



Advertencia

De modo a prevenir contaminación, utilice guantes y otros sistemas de protección durante la desinfección. Aunque, durante los procedimientos, se utilicen guantes, después de su retirada las manos deben lavarse.

Mantenimiento Preventiva

El equipamiento deberá sufrir mediciones de rutina, conforme legislación vigente del país. Más nunca con período superior a 3 años.

Para la protección de su equipamiento, busque una asistencia técnica Saevo para revisiones periódicas de mantenimiento preventiva.

Mantenimiento Correctivo

Saevo declara que la provisión de Esquemas de Circuitos, Lista de Piezas o Cualquier otra información que propicie asistencia técnica por parte del usuario, podrán ser solicitadas, desde que previamente acordado, entre éste y la Empresa Saevo.



Atención

Caso el equipamiento presente cualquier anomalía, verifique si el problema está relacionado con alguno de los ítems listados en el ítem Imprevisto (situación, causa y solución). Si no es posible solucionar el problema, apague el equipamiento y solicite la presencia de un técnico representante Saevo en la reventa más próxima, o solicite a través del Servicio de Atención al cliente Saevo: + 55 (16) 3512-1212.

IMPREVISTOS - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



En caso de encontrar algún problema en la operación, siga las instrucciones abajo para verificar y solucionar el problema y/o contactase con algún representante del lugar.

Imprevistos	Probable Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> - Completamente inoperante. 	<ul style="list-style-type: none"> - Enchufe desconectado de la red. - Falta de energía en la red. - Enchufe de la tapa de condensación desconectado del equipamiento. - Tecla "SPSP" no accionada. 	<ul style="list-style-type: none"> -Conectar el enchufe. -Espere normalización de la red. - Conectar el enchufe. - Presionar la tecla de accionamiento "SPSP".
<ul style="list-style-type: none"> -Después de un ciclo de destilación completa, se obtuvo una producción baja de agua destilada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nivel bajo de agua en la cuba. - Tapa de condensación desenchajada de la cámara de evaporación. 	<ul style="list-style-type: none"> -Regularizar el nivel de agua. -Encajar la tapa de condensación.
<ul style="list-style-type: none"> - Escape de vapor. 	<ul style="list-style-type: none"> -Tapa de condensación desenchajada de la cámara de evaporación. -Anillo de sellado dañado. -Conjunto tapa dañado: serpentina de condensación y/o mini ventilador. 	<ul style="list-style-type: none"> -Encajar la tapa de condensación. -Entrar en contacto con la asistencia técnica Saevo. -Entrar en contacto con la asistencia técnica Saevo.

GARANTÍA DEL EQUIPO

Este equipamiento está cubierto por los plazos de garantía y normas contenidas en el Certificado de Garantía que acompaña el producto.

CONSIDERACIONES FINALES

Entre los cuidados que usted debe tomar con su equipamiento, el más importante es el que se refiere a la o reposición de piezas.

Para garantizar la vida útil de su aparato, reponga solamente piezas originales Saevo.

Las mismas tienen garantía de los patrones y las especificaciones técnicas exigidas por el representante Saevo.

Llamamos su atención para nuestra red de revendedores autorizados. Solo ella mantendrá su equipamiento constantemente nuevo, con sus asistentes técnicos entrenados y las herramientas específicas para la correcta mantenimiento de su aparato.

Siempre que precise, solicite la presencia de un técnico representante Saevo en la reventa más próxima, o solicite a través del Servicio de Atención al cliente Saevo: + 55 (16) 3512-1212.

SAEVO 